

ZUNANJA OGREVANA OMARICA za avtomatski defibrilator - AED **Aivia 200**

Predstavitev

AIVIA 200 je namenjena namestitvi na zunanosti stavbe.

Združuje moč in lahkotnost

Sestavljena je iz dveh ločenih delov:

- Pokrov oziroma vratca iz polikarbonata
- Podstavek oziroma ohišje iz ABS plastike

Ti materiali so dobro znani v večih industrijah med drugim tudi v avtoindustriji, saj omogoča odlično odpornost na proti udarcem. Polikarbonat se uporablja v žarometih avtomobilov, ABS pa za odbijače

Oznake

Na sprednji strani je prikazana veriga oživljanja in trije jasni piktogrami z navodili za uporabo.

Na straneh sta napisa AED (v angleščini) in DAE (v latinščini). Ločena od logotipa za defibrilator (srce z električno iskro).



Aivia 200

Značilnosti

Dnevna/nočna osvetlitev predala za AED z LED lučjo s samodejno zaznavanjem svetlobe.

Dostop do AED je zaščiten s plastično prevlečenimi tesnili.

Odpiranje pokrova samodejno sproži vizualni in zvočni alarm (utripajoče rdeče led diode in sireno).

Ogrevanje je povezano s temperaturnim senzorjem, ki omogoča, da se aktivira, ko je dosežen minimalni prag 10 °C.

Vizualni alarm z rdečimi lučkami opozarja na nepravilnosti (temperatura zunaj območja).

Lokacija


Mrežno napajanje (24 V DC) omogoča namestitve možnosti ogrevanja in s tem omogoča namestitve na prostem, na primer na javni poti.

Prezračevanje omarice za AED zmanjšuje previsoke temperature v AED

Omarico je kljub temu potrebno postaviti v senco, da se prepreči kopičenje toplote zaradi neposredne sončne svetlobe.

Dimenzije:

V = 423 mm, D = 388 mm, G = 201 mm, Teža = 3.5 kg

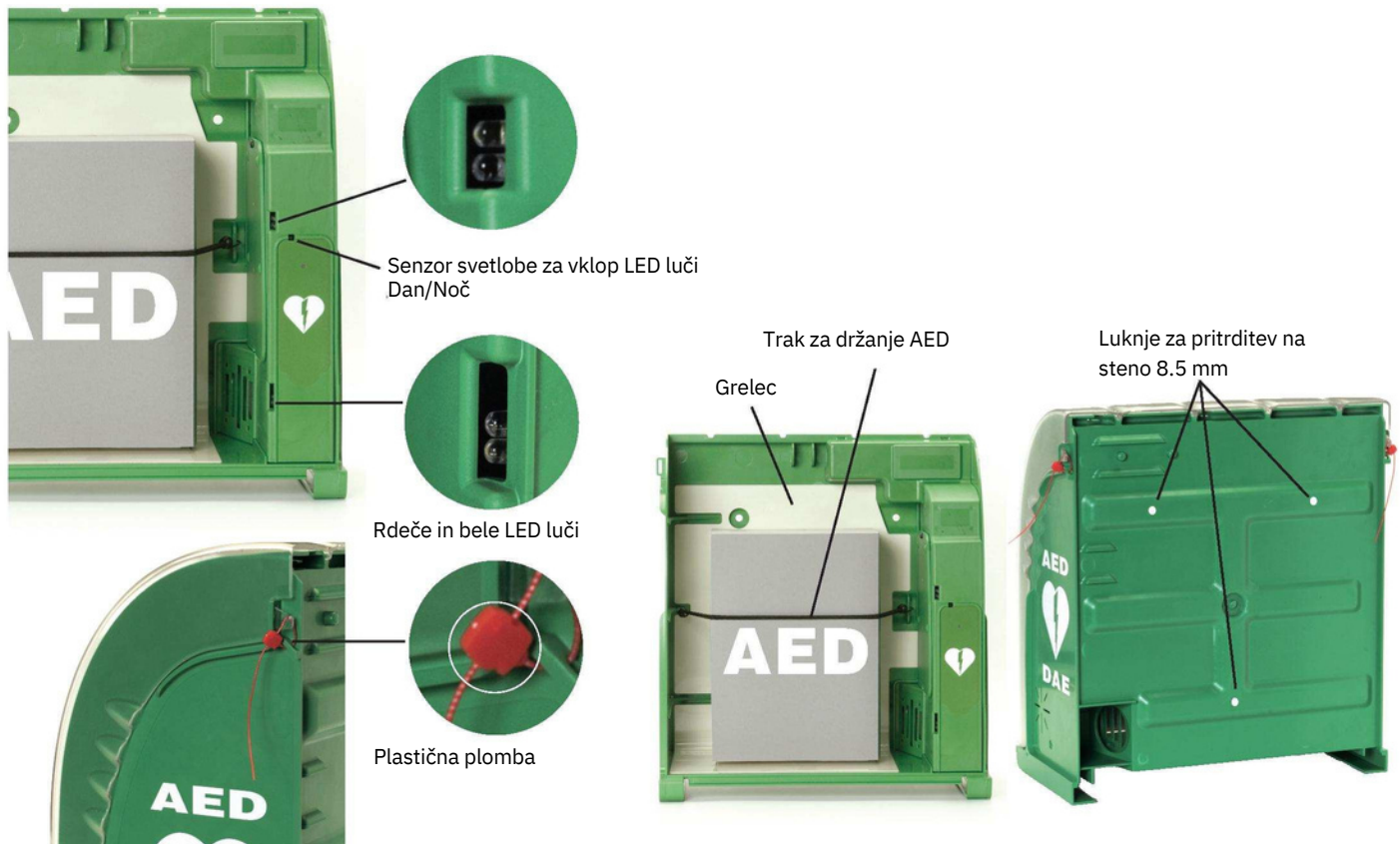

PYRESCOM

Mas des Tilleuls 66680
Canohès - FRANC E Tel :
+33 (0)4 68 68 39 6 8 Fax:
+33 (0)4 68 68 39 6 9
aivia@pyres.com
www.pyres.com

URADNI DISTRIBUTOR

Medical 4.Life

AIVIA 200