


PREVEZA ZA OKONČINE

NAVODILA ZA UPORABO



Poiščite mesto poškodbe* in namestite pripomoček **SAM[®] XT** okoli okončine, neposredno na kožo 5–7 cm (2–3 palce) nad rano.

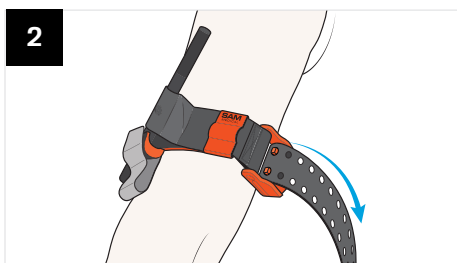

Vstavite konico jermena skozi odprtino v zaponki. Primite jermen blizu zaponke ter ga močno in enakomerno vlecite proti zaponki, dokler se ne ustavi. Ohranite napetost in pritisnite jermen v nasprotni smeri, da ga zadržite na mestu.

NE PREKRIJTE VPENJALNIH KLJUK ZATEGOVALNE PALICE.



Sukajte kovinsko zategovalno palico, dokler se krvavitev ne ustavi.



Pritrdite kovinsko zategovalno palico v vpenjalne kljuke in se prepričajte, da se je krvavitev ustavila. Če se krvavitev nadaljuje, poskusite še bolj zategniti prevezo z dodatnimi zasuki kovinske zategovalne palice. Če s tem ne ustavite krvavitve, namestite še en pripomoček **SAM[®] XT** poleg prvega in zagotovite, da se krvavitev ustavi.




Zavijte jermen med vpenjalne kljuke zategovalne palice, čez palico in okoli okončine.

Pritrdite časovni trak (④) čez vpenjalne kljuke zategovalne palice in zabeležite čas namestitve.

⚠ SVARILO: Pripomoček SAM[®] XT se NE SME namestiti čez trdne predmete v oblačilih.

* Če mesto poškodbe ni zlahka vidno, **namestite pripomoček SAM[®] XT čim višje in čim tesneje na poškodovani roki ali nogi.** Ko razmere to dopuščajo, ponovno ocenite poškodovano okončino in namestite pripomoček SAM[®] XT neposredno na kožo 5–7 cm (2–3 palce) nad rano.

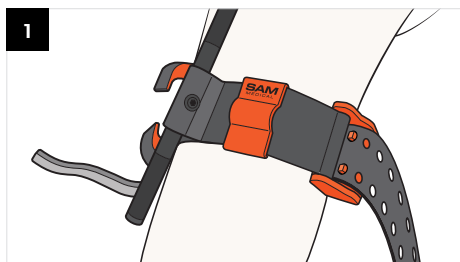

Pustite prevezo nameščeno toliko časa, kot presodi zdravnik.

PRIPOMOČEK SAM® XT ODSTRANITE TAKO, da sprostite časovni trak (⌚) in odvijete kovinsko zategovalno palico.

Dvignite jeziček na sprednji strani zaponke, tako da se roglja umakneta.

ODSTRANJEVANJE: Pripomoček zavrzite skladno z bolnišničnim pravilnikom.

TEHNIČNI PODATKI

VELIKOST IN MASA Z OVOJNINO*

Dolžina: 6,3 cm (2,5 palca)

Širina: 3,8 cm (1,5 palca)

Višina: 18,4 cm (7,25 palca)

Masa: 108 g (3,8 unče)

SPECIFIKACIJE ZA DELO

Tehnologija zaponke TRUFORCE™ se samodejno zaklene, da zgrabi luknjice za jermene v razponu premera: 13,9–88,9 cm (5,5–35 palcev)

*Velikost in masa se razlikujeta glede na konfiguracijo in proizvodni postopek.

Obvestilo uporabnikom in/ali bolnikom:

O vsakem resnem incidentu, do katerega pride v zvezi s tem pripomočkom, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik bivališče.

PREDVIDENA UPORABA:

Prevezo za okončine SAM® XT Extremity Tourniquet je treba namestiti okoli okončine, tako da zapre pretok arterijske krvi.

INDIKACIJA ZA UPORABO:

Pripomoček je zasnovan, da ga prvi reševalci uporabijo pri bolnikih s poškodovanimi okončinami v razponu premera od 13,9–88,9 cm (5,5–35 palcev) za nadzor življenjsko nevarne krvavitve, kadar neposredni pritisk ni učinkovit ali je nepraktičen.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Pripomoček SAM XT se ne sme namestiti čez trdne predmete.
- Pustite prevezo nameščeno toliko časa, kot presodi zdravnik.
- Uporabljen pripomoček zavrzite, kot določa protokol ustanove za odstranjevanje potencialno biološko nevarnih materialov.
- Pripomoček je namenjen samo za enkratno uporabo.
- Ponovna uporaba pripomočka lahko povzroči bolezen (npr. okužbo) ali poškodbo (zmanjšano zmogljivost).

NEŽELENI UČINKI:

- Namestitev preveze lahko povzroči precejšnje bolečine.
- Namestitev preveze lahko povzroči poškodbe kože, mišic, žil ali živcev.
- Daljša namestitev preveze (> 4 ure) lahko povzroči rhabdmiolizo ali potrebo po fasciotomiji ali amputaciji.

Ameriški patent št. 10,258,347 | 10,363,046

SAM® je zaščitena blagovna znamka v Združenih državah Amerike in drugih državah.

REF ● XT600-BK-EN / NSN št. 6515-01-670-2240

REF ● XT600-OR-EN

REF ● XT600-BL-EN

SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200
Tualatin, OR 97062 ZDA
+1 503.639.5474

sammedical.com

EC REP CE
Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP, The Hague, Nizozemska

MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,
2595 AM The Hague, Nizozemska

SLOVARČEK SIMBOLOV:

Proizvajalec	
Lot/koda serije	
Kataloška številka	
Ne uporabite ponovno.	
Simbol časovnega traku	
Svarilo	
Medicinski pripomoček	
Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti	
Oznaka CE	
Glejte navodila za uporabo. Elektronska različica (eIFU) je na voljo na naslovu: sammedical.com/eIFU	
Uvoznik	